



| Ácido grabador

Ácido Ortofosfórico al 37%

INSTRUCCIONES DE USO

PÁGINA..... 2; 3

Tedequim

TEDEQUIM°
ACIDO GRABADOR
Ácido ortofosfórico 37% - gel azul

Instrucciones de uso:

Para la técnica de grabado ácido sobre esmalte, limpiar y secar la superficie antes de la aplicación. Aislar la superficie. Agitar y colocar la aguja aplicadora en la jeringa. Aplicar únicamente en la zona del esmalte donde se vaya a recubrir con material restaurador posteriormente. Dejar actuar entre 15 y 30 s. Luego enjuagar con abundante agua. Sacar la aguja aplicadora y guardar la jeringa bien tapada.

Se deja a criterio del profesional la utilización en dentina.

Contenido:

Jeringa por 7 g
Jeringa por 12 g
Aplicadores
plásticos

Almacenamiento:

Conservar bien tapado y protegido de la luz a temperatura entre 15° y 30°

Autorizado por ANMAT PM 1277-1.

Venta exclusiva a profesionales e Instalaciones sanitarias
Director técnico: Miryam Della Vedova- Matrícula N° 2107

Elaborado por TEDEQUIN SRL

Bv. De los Polacos 6136- 5147 Córdoba- Argentina

Tel: +54 3543 448260

www.tedequim.com

Rev. B



Tedequim

zavher

+562 2244 3506 / 2244 3546
ventas@zavher.cl
www.zavher.cl

Zavala y Herrera Ltda.
Av. Nueva Providencia 1945 of 302
Providencia, Santiago