

P O L A



SDI

SISTEMA AVANZADO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

polaoffice bulk kit

peróxido de hidrógeno al 35%

rápido sistema de blanqueamiento en consultorio

- Un blanqueamiento dental sencillo, de aplicación en consultorio
- Se requiere mínimo tiempo en el sillón dental. Dientes más blancos en tan sólo 30 minutos
- Propiedades desensibilizantes únicas, que inhiben la sensibilidad postoperatoria en el paciente
- Ahora disponible en presentación a granel



Kit para
5 pacientes
MEJOR COSTO/
BENEFICIO DEL
MERCADO!

CONTENIDO:

bote de polvo de 3grs
polvo utilizado de acuerdo a lo requerido,
empleando la cucharilla medidora

+

frasco de líquido de 20ml
peróxido de hidrógeno fácilmente dispensado
a través de un gotero

+

barrera gingival de 3grs
3 jeringas de 1gr. de barrera gingival azul
fotocurable, para la protección de tejidos blandos

+

accesorios

bote de mezcla, cucharilla medidora,
puntas para jeringa de barrera gingival



YOUR SMILE. OUR VISION.


zavher

instrucciones para blanqueamiento de dientes vitales


1. Determine y registre el tono preoperatorio.

Por favor siga el siguiente orden en la guía de colores Vita* de acuerdo al grado de brillantez: B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4, C4

2. Limpie los dientes **SOLO** con una pasta a base de polvo de piedra pómez.
3. Coloque un retractor de labios y cubra la superficie de los labios expuestos con un gel de vaselina

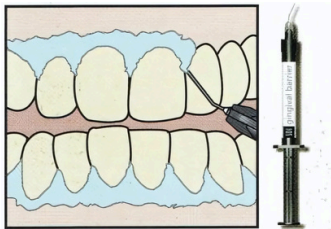

4. Seque los dientes y aplique la barrera gingival a ambas arcadas, abarcando levemente el esmalte y los espacios interproximales.

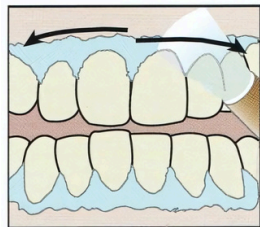

5. Fotocure haciendo un movimiento de abanico de 10 a 20 segundos hasta que la Barrera Gingival este polimerizada.

6. Mezcla del gel de blanqueamiento: Utilizando el bote vacío transparente suministrado (con tapa negra) como godete de mezcla, dispense la cantidad requerida de polvo y líquido. Las recomendaciones se enlistan en la siguiente tabla. Por favor note que estas son sólo recomendaciones, y puede agregarse más o menos líquido hasta obtener la consistencia del gel/mouse deseada. Coloque nuevamente y con cuidado las tapas a los botes de polvo y líquido.


1 diente, 2 aplicaciones
1 nivel de polvo
5 ± 1 gotas de líquido

1 arcada, 1 aplicación
2 niveles de polvo
10 ± 2 gotas de líquido


2 arcadas, 1 aplicación
4 niveles de polvo
20 ± 3 gotas de líquido




7. Mezcle inmediatamente, utilizando una punta aplicadora Points, hasta que el gel sea homogéneo.

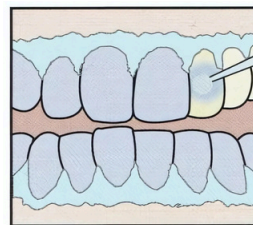


8. Aplique una capa **delgada** del gel en los dientes a tratar

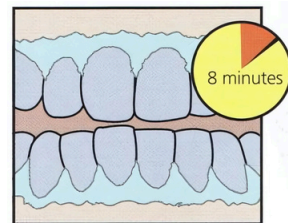


9. Deje el gel durante 8 minutos (Opcional: puede utilizar una lámpara de fotocurado en esta etapa, por favor refiérase a las recomendaciones del fabricante de la lámpara)

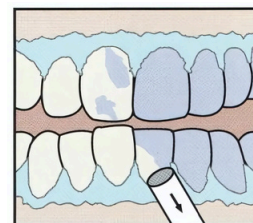


10. Succione el gel utilizando un eyector **SIN LAVAR**

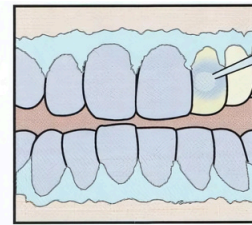

11. Realice los pasos 9 a 11 tres veces (opcional 4 veces). Nota: La mezcla debe ser utilizada para dos aplicaciones o dentro de los 20 minutos posteriores a ser realizada.

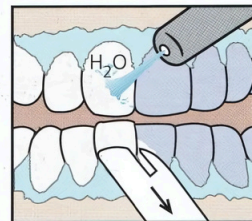

12. Después de la última aplicación, aspire todo el gel, lave succionando.

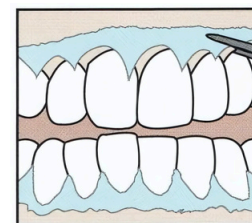

13. Retire la Barrera Gingival levantándola por uno de sus extremos.

ADVERTENCIA:

1. Sólo para uso profesional.
2. Los pacientes deben utilizar lentes de protección.
3. El odontólogo debe utilizar guantes, cubrebocas y lentes de protección.
4. No se utilice en mujeres embarazadas ni en periodo de lactancia.
5. No se utilice en niños menores de 14 años de edad.
6. No se utilice la Barrera Gingival en personas alérgicas a las resinas.
7. No se utilice Pola Office en personas alérgicas a los peróxidos.
8. Cualquier persona con antecedentes de alergias químicas debe acudir a una revisión previa a la colocación del tratamiento.
9. No anestesia a los pacientes.
10. La jeringa / frasco de líquido de Pola Office puede estar bajo presión - retire cuidadosamente la tapa.
11. No permita que la mezcla de gel o el líquido de Pola Office entre en contacto con la piel, ojos y tejidos blandos.
12. Pola Office no blanquea ningún material restaurador.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **PIEL/TEJIDOS (contacto):** Inmediatamente lave con abundante agua. Aplique una pasta hecha de bicarbonato de sodio con agua en el área afectada. Busque atención médica si persisten los síntomas.
- **OJOS (contacto):** Abra el ojo ampliamente y enjuague abundantemente con agua corriente durante 15 minutos. Busque atención médica.
- **INGESTION:** Enjuague la boca con agua. Haga gárgaras con agua con sal y beba leche en grandes cantidades. Busque atención médica si los síntomas persisten.
- **INHALACION (polvo):** Respire aire fresco. Si la respiración se dificulta, busque atención médica.

RECOMENDACIONES:

1. El paciente debe tener buena salud general.
2. Selle todas las raíces expuestas y restauraciones.
3. Informe al paciente que los resultados no están garantizados, debido a que la remoción de las manchas varía de paciente a paciente.
4. Manténgase en refrigeración y utilice a temperatura ambiente.
5. No se recomienda el grabado +ácido previo al tratamiento.
6. No se recomienda el uso de eyectores de punta amplia, ya que pueden esparcir el gel a otras áreas.
7. Pueden ocurrir ligeras molestias en los dientes durante el tratamiento como un efecto secundario.
8. Si el paciente experimenta sensibilidad durante el fotocurado, retire la luz lentamente. Si esto no funciona, remueva el gel y enjuague el área afectada. Busque otras posibles causas.
9. Reemplace las restauraciones estéticas después de 2 a 4 semanas.
10. Advierta al paciente que no debe fumar, consumir alimentos o bebidas con colorantes, muy fríos o muy calientes, por lo menos 2 días.
11. Maneje la sensibilidad post-operatoria con un gel desensibilizante o pasta dental.
12. Prescriba, si lo desea, Pola Day o Pola Night para mantener el brillo.
13. La hoja de datos de seguridad del material está disponible en www.sdi.com.au
14. Un formato para el consentimiento del paciente está disponible para ser descargado en: www.sdi.com.au

INDICACIONES:

- Blanqueamiento de dientes vitales.
- Blanqueamiento de dientes no vitales.

Instrucciones para blanqueamiento de dientes no vitales

1. Verifique que la obturación endodóntica sea adecuada.
2. Aísle el diente con dique de hule.
3. Abra el acceso lingual a la cámara pulpar y remueva todo el composite, material de base y gutapercha de 2-3mm apical a la unión cemento-esmalte.
4. Coloque una base de ionómero de vidrio de 1mm de ancho para asegurar una barrera entre el conducto radicular "sellado" y el gel de blanqueamiento.
5. Coloque y fotocure una capa delgada de Barrera Gingival en la región de la encía del diente aislado
6. Mezcla el gel de Pola Office como se indica en los pasos 6 a 8 de las instrucciones para blanqueamiento de dientes vitales.
7. Coloque el gel en la cámara pulpar abierta y en la superficie labial del diente.
8. Deje el gel durante 8 minutos. (Opcional: puede utilizar una lámpara de fotocurado en esta etapa, por favor refiérase a las recomendaciones del fabricante de la lámpara)
9. Succione el gel utilizando un eyector.
10. Realice los pasos 7 a 9 hasta que alcance el tono deseado. Nota: La mezcla debe ser utilizada para dos aplicaciones o dentro de los 20 minutos posteriores a ser realizada.
11. Lave y succione después de la última aplicación.
12. Retire la Barrera Gingival y selle el diente con un restaurador apropiado. nota: Llame periódicamente a los pacientes para una revisión clínica y radiográfica.

POLA

SISTEMA AVANZADO DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL

SDI

Instrucciones postoperatorias: blanqueamiento dental en clínica con Pola

- Siga las instrucciones de su dentista.
- Si es usted fumador, evite el tabaco durante 48 horas.
- Absténgase de ingerir alimentos (salsa de tomate, arándanos, etc.) y bebidas (café, té, etc.) muy pigmentados durante 48 horas.
- Puede experimentar una leve sensibilidad a los líquidos fríos o calientes que habitualmente desaparece en 1 o 2 días. Si la sensibilidad es grave o persiste, póngase en contacto con su dentista.
- Si experimenta sensibilidad en las encías, evite la zona afectada al cepillarse los dientes.
- Los resultados inmediatos del blanqueamiento pueden ser bastante espectaculares debido a una leve deshidratación de los dientes. Es normal que el color se atenúe al finalizar el tratamiento cuando los dientes se rehidratan hasta alcanzar un tono blanco natural.
- Los resultados a largo plazo varían de un paciente a otro. Esto puede depender del tono original de sus dientes, así como de hábitos como fumar o ingerir bebidas muy pigmentadas (vino tinto, café, té, etc.).
- Se recomienda realizarse tratamientos de «retoque» cada 6-12 meses para mantener el tono. Puede consultar a su dentista sobre las distintas opciones de «retoque», como Pola Day, Pola Night o Pola Light.
- Los empastes, coronas, adhesivos, etc. existentes no blanquearán su tono original. Por lo tanto, es posible que sea necesario cambiarlos para que encajen con su nueva sonrisa.
- Si su familia o amigos se percatan del nuevo brillo de su sonrisa, hágales saber que el blanqueamiento Pola también puede ayudarles a mejorar su sonrisa.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

La información contenida en este archivo se presenta únicamente a título informativo y de interés. Se trata únicamente de una guía para un formulario postoperatorio para el paciente tras realizar un blanqueamiento profesional en clínica. Rechazamos cualquier garantía o representación implícita con respecto a la exactitud o integridad de la información. Usted asume toda la responsabilidad por el uso que haga de la información de esta página y comprende y acepta que SDI Limited y/o sus afiliados no son responsables de reclamación, pérdida o daño algunos resultantes de su uso.



ESCANEE EL CÓDIGO
QR PARA CONOCER
MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LOS
PRODUCTOS POLA

POLA

Dientes más blancos.
Un aspecto más brillante.

SISTEMA AVANZADO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

SDI.COM.AU | POLAWHITE.COM.AU

EN CHILE DISTRIBUIDO POR ZAVHER.CL



SDI

YOUR OUR
SMILE. VISION.