

Smartcord™


Hilo Retractor Tejido

100% Algodon

Tinta Hidrofilica Sin Agentes Blanqueadores Fluorescentes

Make It
SMART



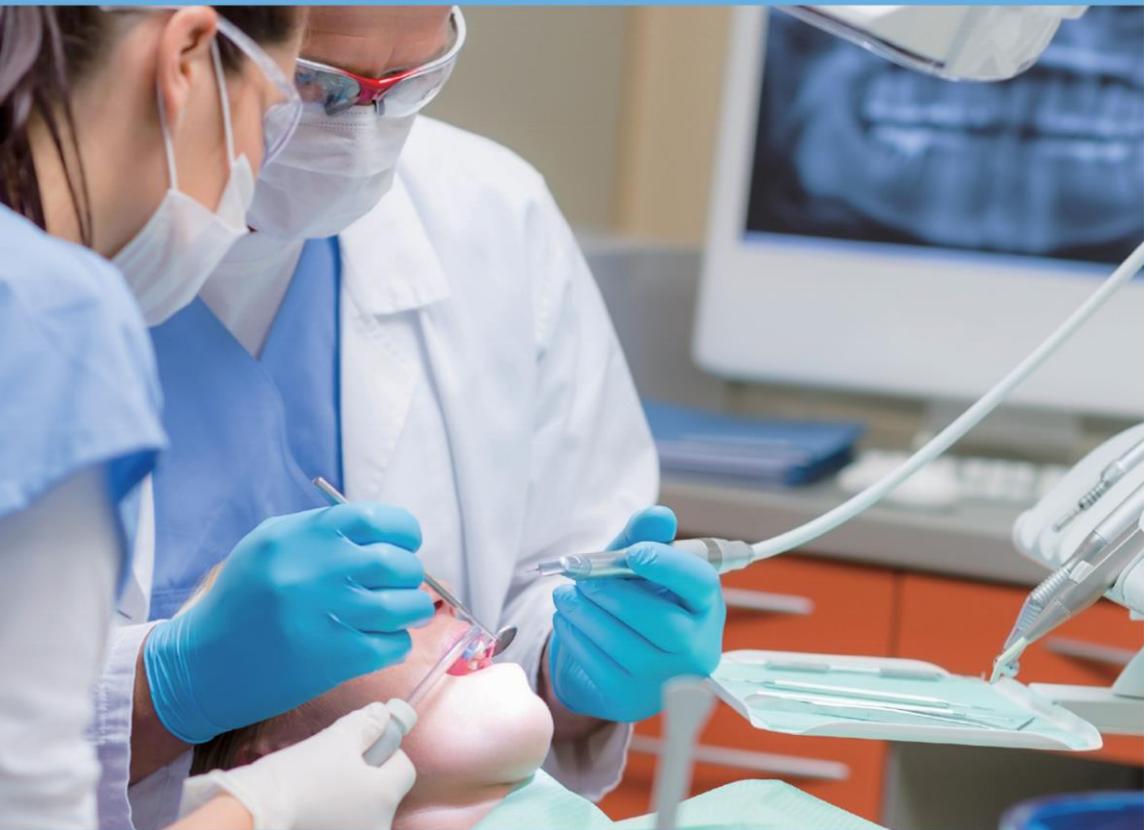

Smartcord™

Knitted Retraction Cord

100% Cotton

Hydrophillic Dye Without Fluorescent Whitening Agent



Smartcord 0³
(Ultra-fine)



Smartcord 0²
(Extra-fine)



Smartcord 0
(Fine)



Smartcord 1
(Medium)




Smartcord 2
(Thick)

Make It
SMART

Smartcord™

Longitud Extendida


- 20% más Largo
- 120inch, 305cm

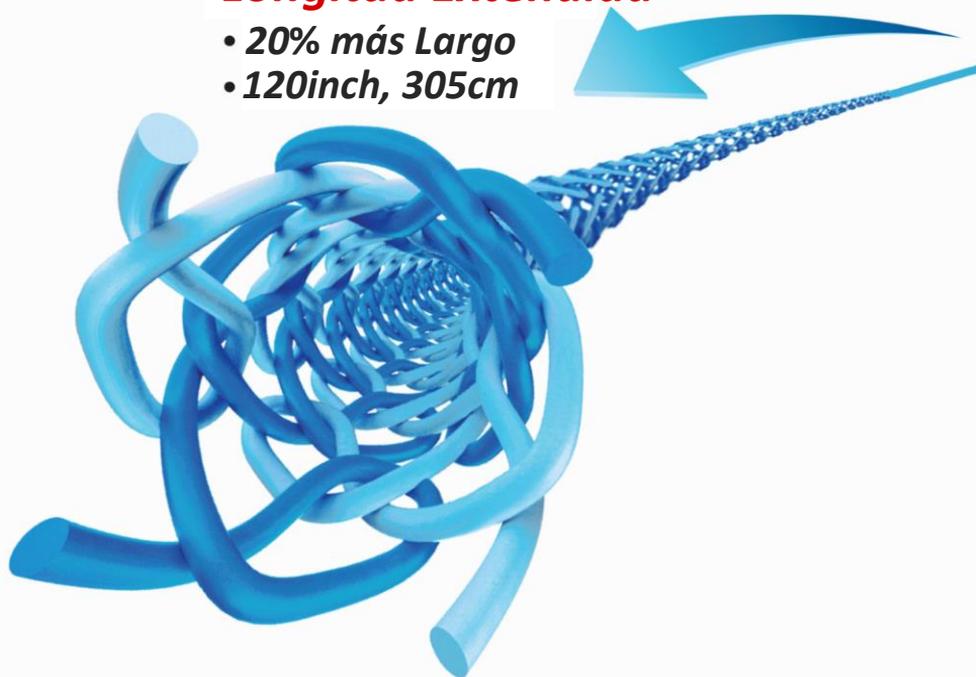

Bobina Interna™

Smartcord™ tiene una bobina que ayuda a mantener libre de enredos al hilo retractor gingival.

Esto proporciona comodidad y rapidez de uso disminuyendo además las posibilidades de contaminación.

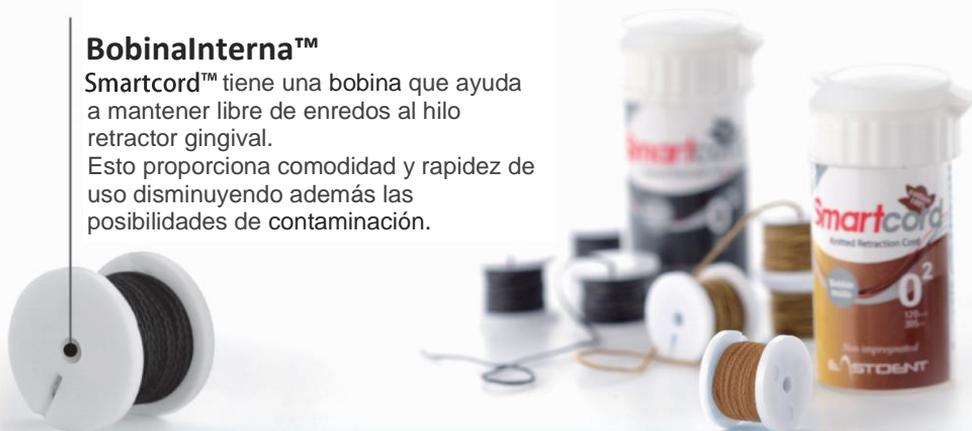



FácilCorte™

Smartcord™ viene con una cuchilla de corte en la tapa, por lo que el hilo se puede cortar fácilmente, manteniendo la higiene. Esto es conveniente y disminuye las posibilidades de contaminación.

Regla Inteligente™

Smartcord™ tiene una regla diseñada en la etiqueta, lo que permite medir la longitud requerida de forma simple y precisa.

Ventana Transparente™

Smartcord™ tiene una pequeña ventana que permite controlar fácilmente la cantidad restante de hilo retractor gingival.



Opciones:

Smartcord™ esta disponible en 5 diámetros identificados por diferentes colores:

Smartcord 0³ (Ultra-fino)
negro/gris -
305cm(120inch) -



Smartcord 0² (Extra-fino)
cafe/amarillo -
305cm(120inch) -



Smartcord 0 (Fino)
purgura/lavanda -
305cm(120inch) -



Smartcord 1 (Medio)
azul/celeste -
305cm(120inch) -



Smartcord 2 (Grosso)
verde/verde claro -
305cm(120inch) -



Indicaciones:

Retracción gingival antes de tomar una impresión y/o colocar restaurador de resina cerca del margen de encía.

Precauciones:

Comprobar el estado del tejido gingival (por ejemplo, la profundidad o espesor)

Procedimiento:

- 1 Seleccione un hilo con el diámetro apropiado.
- 2 Corte el hilo con el largo deseado usando EasyCut™ y SmartRuler™. Si es necesario puede ser impregnado con una solución hemostática.
- 3 Inserte el hilo retractor en el surco por medio de un empacador.
- 4 Deje el hilo en el surco por 5 minutos.
- 5 Retire el hilo justo antes de tomar la impresión. Humedezca ligeramente el hilo para hacer más fácil su eliminación y reducir la hemorragia gingival.

Almacenamiento:

Cerrar la tapa después de su uso y guárdelo en un lugar seco y alejado de la luz directa

Precaución:

- Solo para uso profesional.
- Para evitar un posible desplazamiento permanente de la encía, el hilo no se debe mantener durante más de 20 minutos en el surco.
- Después de terminar el procedimiento, asegúrese de retirar el hilo del surco.

Contenido:

-Dispensador y BobinaInterna™ con 305cm(120inch).

Símbolos(EN980):



⚠ CAUTION:

U.S.Federal Law restricts this material to the sale by, or on the order of a dentist.

