

LÁSER SMART^M DR

MEDICINA ESTÉTICA

...BE SMART... ¡EMPIECE Y SIENTA LA DIFERENCIA!



CE 0197

TODD - EN - UNO

LASOTRONIX, Elektroniczna 2A, 05-500 Piaseczno, POLONIA, Teléfono: +48 22 736 34 34, www.akademia.laserowa.pl

www.lasotronix.com

94801120v.02 11.2025



LASOTRONIX PONE EN EL MERCADO SU LÁSER DE ALTA CALIDAD

Gracias a la opción de incorporar varias longitudes de onda en el equipo y a su amplia gama de accesorios, SMART^{III}DR permite realizar gran variedad de tratamientos en consulta y en quirófano; resultando un equipo versátil, efectivo y rentable.

- Lifting estético facial - rejuvenecimiento de la piel y modelado facial de forma conjunta.
- Lifting corporal – Remodelación y eliminación de adiposidades localizadas.
- Microcirugía – corte y coagulación de alta precisión. Menor sangrado y más rápida recuperación.
- Lesiones Vasculares – eliminación de telangiectasias y otras lesiones superficiales.
- Curación de heridas - reduce la formación de tejido cicatrizal, causante del dolor crónico. Efecto antiinflamatorio.

ANTES DESPUÉS



Realizado por Dr. Pérez Torres



Realizado por Dr. Katarzyna Domarus




Realizado por Dr. Katarzyna Domarus

ANTES DESPUÉS



Realizado por Dr. Maryam Hafezibakhtiari

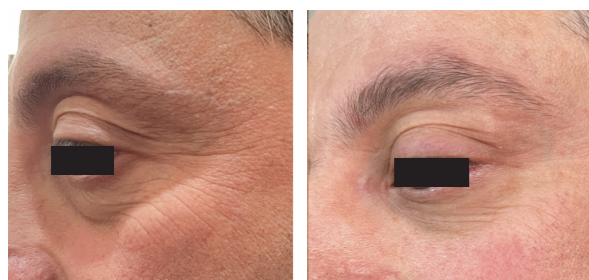


Realizado por K. Wójtowicz



Indicaciones del tratamiento con láser SMART^{III}DR

- Atenua las arrugas
- Mejora la textura de la piel
- Reduce el tamaño de los poros
- Recupera la elasticidad y disminuye la flacidez
- Rejuvenecimiento cutáneo
- Hidratación profunda
- Aclara y unifica el tono cutáneo
- Elimina y corrige las lesiones de acné
- Efecto bactericida

QUÉ LONGITUD DE ONDA ES LA RECOMENDADA

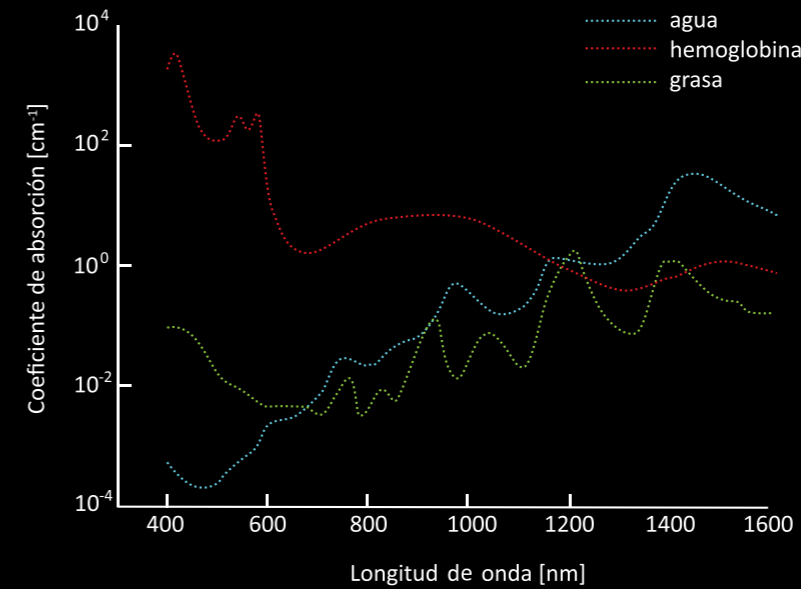

Los láseres de diodo pertenecen a unos de los convertidores más eficaces de energía eléctrica en luz láser y permiten inducir una serie de reacciones tisulares, como la coagulación, la vaporización o fotobiomodulación. Los láseres de diodo ofrecen una penetración tisular bastante profunda. Modificando los parámetros del láser, es posible generar diferentes efectos en los tejidos. Esto abre un amplio abanico de posibles indicaciones.

La longitud de onda 1470 nm es ideal para el rejuvenecimiento de la piel. Esta longitud de onda es altamente absorbida por el agua y la grasa. Se produce un efecto lipolítico y desaparece el tejido graso que provoca la flacidez. Se observa una mejora de la flacidez causada por el tejido graso. En el lugar de la aplicación se inicia la formación de colágeno, es decir, el proceso de autorrenovación de la piel. Se activan las funciones metabólicas de la matriz extracelular. Se reduce el exceso de tejido adiposo localizado. Se genera tensado de la piel, y la línea mandibular y el contorno facial se definen.

¿POR QUÉ EL LÁSER LASOTRONIX?

- Más de 20 años de experiencia en tecnología láser
- Software fácil de usar
- Protocolos terapéuticos predefinidos modificables y asignables al paciente
- Costes operativos mínimos
- Dispositivo muy compacto, ligero y de pequeño tamaño
- Panel de pantalla táctil intuitivo
- Múltiples funciones de seguridad
- Uso económico para el usuario
- Bajo coste de mantenimiento, diodos de alta fiabilidad
- Excelente portabilidad
- Estación de trabajo confortable



*Los colores de láser en las fotos pueden diferir de los colores reales del producto